


Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки

Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки е био-адхезивен гел за уста. Гелът бързо образува невидим филм, който защитава венците от дискомфорт и болка. Натуралните му съставки помагат за намаление на болката и зачервяването в засегнатите зони.

Апликаторът е снабден със силиконова четка, която нежно масажирва венците, като по този начин осигурява облекчение на дискомфорта и симптомите, свързани с никненето на зъбките.

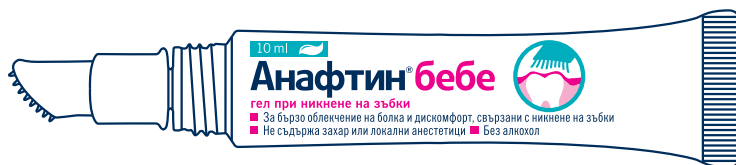

Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки не съдържа локални анестетици, лекарства, алкохол или захар.

Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки не причинява дразнене при приложение и има приятен вкус на банан.

Указания за употреба:

Нанесете достатъчно гел, за да покриете засегнатата зона и нежно масажирайте венците с апликатора.

За предпочитане е да се прилага след хранене и преди бебето да заспи, за да се улесни образуването на филма и за по-дълго облекчение на болката на малкия пациент. Използвайте толкова често, колкото е необходимо. Затваряйте капачката след всяко приложение. Отстранете всякакви остатъци от продукта, които могат да попречат на следващото приложение на гела.

Съставки:

Вода, поливинилпиролidon (PVP), малтодекстрин, пропиленгликол, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, *Aloe barbadensis*, ксантанова гума, аромат, калиев сорбат, натриев бензоат, динатриев ЕДТА, натриев хиалуронат, ксилитол, цетилпиридин-хлорид, глициретинова киселина, *Crocus sativus*

Внимание:

Всяка туба Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки трябва да се използва само от един-единствен пациент, за да се избегне кръстосано замърсяване на апликатора

и гела. Употребата на Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки е противопоказана при данни за свръхчувствителност към някоя от съставките. Ако сте бременна, попитайте Вашия лекар преди употребата на продукта.

Предпазни мерки и предупреждения:

ВНИМАНИЕ:

Продуктът трябва да се прилага само от възрастен.

Това медицинско изделие не е играчка! НИКОГА не го оставяйте в ръцете на дете.

Риск от задавяне!

Проверете медицинското изделие преди употреба за всеки признак на увреждане или скъсване и по време на приложение на гела обърнете внимание дали някоя част от горния край на апликатора не се е отделила. Ако това се случи, спрете да го използвате.

Не се опитвайте да възстановите отделената част.

Спрете употребата на изделието, след като гелът е свършил.

Да не се използва след срока на годност или ако тубата изглежда увредена или течаша. Да се съхранява на стайна температура, далеч от директна топлина.


Да не се замразява.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Горни зъби



Долни зъби

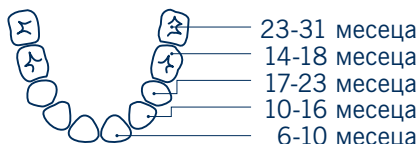

Съдържание:

10 ml

Производител:

Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 5, 20124 Milan, Италия



Разпространява се от:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Германия

Последно одобрение: 10/2014 г.