

Анафтин® вода за уста

Анафтин® вода за уста помага за облекчение на болка, причинена от ранички в устата, напр. такива, дължащи се на афтозен стоматит, афтозни язви, както и ранички от брекети и неудобни зъбни протези. Използва се също и за дифузни афтозни язви.

Начин на действие:

Анафтин® вода за уста съдържа поливинилпиролidon (PVP) и хиалуронова киселина, които образуват защитен филм, който прилепва към устната кухина, осигурявайки механична бариера на засегнатите зони, като по този начин облекчава болката, причинена от оголените нервни окончания. Хиалуроновата киселина и Aloe vera в състава помагат за естественото заздравяване на увредените тъкани.

Указания за употреба:

Напълнете мерителната капачка до индикаторния знак 10 ml. Изплакнете устата поне за 1 минута, след което изплюйте. Употребявайте 3-4 пъти дневно или по-често, ако е необходимо. За най-добри резултати избягвайте хранене или прием на течности поне 1 час след приложението. При случайно поглъщане не са необходими допълнителни мерки.

Съставки:

Вода, поливинилпиролidon (PVP), малтодекстрин, пропиленгликол, *Aloe barbadensis*, хидроксиетилцелулоза, калиев сорбат, натриев бензоат, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, динатриев ЕДТА, бензалкониев хлорид, натриев

хиалуронат, аромат, захарин натрий, дикалиев глицирилат

Внимание:

Употребата на Анафтин® вода за уста е противопоказана при данни за свръхчувствителност към някоя от съставките. Ако сте бременна, попитайте Вашия лекар преди употребата на продукта. Ако страдате често от язви в устата, препоръчително е да потърсите медицинска консултация.

Предпазни мерки и предупреждения:

Да не се използва след срока на годност или ако бутилката изглежда увредена или течаша. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява на стайна температура, далеч от директна топлина. Да не се замразява.

Съдържание:

120 ml

Производител:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milan, Италия



Разпространява се от:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicker Weg 125,
12489 Berlin, Германия

Последно одобрение: 09/2016 г.