

Анафтин® спрей

Анафтин® спрей помага за облекчение на болка, причинена от ранички в устата, напр. такива, дължащи се на афтозен стоматит, афтозни язви, както и ранички от брекети и неудобни протези. Използва се също и за дифузни афтозни язви.

Начин на действие:

Анафтин® спрей съдържа поливинилпиролidon (PVP) и хиалуронова киселина, които образуват защитен филм, който прилепва към устната кухина, осигурявайки ефективна бариера на засегнатите зони, като по този начин облекчава болката, причинена от оголените нервни окончания. Хиалуроновата киселина и Aloe vera в състава помагат за естественото заздравяване на увредените тъкани.

Указания за употреба:

Когато използвате продукта за първи път, свалете капачката и поставете накрайника на спрея. Насочете накрайника към раничката в устата и пръснете 3 пъти или колкото е необходимо, за да покриете засегнатата зона. За най-добри резултати избягвайте хранене или прием на течности поне 1 час след приложението. Накрайникът позволява на продукта да покрие раничката в устата максимално ефективно.

Употребявайте 3-4 пъти дневно или по-често, ако е необходимо.

Съставки:

Вода, пропиленгликол, поливинилпиролidon (PVP), малтодекстрин, *Aloe barbadensis*, калиев сорбат, натриев бензоат, PEG-40 хидрогенирано рициново

масло, динатриев ЕДТА, бензалкониев хлорид, натриев хиалуронат, аромат, захарин натрий, дикалиев глицирилат

Внимание:

Употребата на Анафтин® спрей е противопоказана при данни за свръхчувствителност към някоя от съставките. Ако сте бременна, попитайте Вашия лекар преди употребата на продукта. Ако страдате често от язви в устата, препоръчително е да потърсите медицинска консултация.

Предпазни мерки и предупреждения:

Да не се използва след срока на годност или ако бутилката изглежда увредена или течаша. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява на стайна температура, далеч от директна топлина. Да не се замразява. Да се избягва контакт с очите.

Съдържание:

15 ml

Производител:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milan, Италия



Разпространява се от:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Германия

Последно одобрение: 09/2016 г.