

# Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки

Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки е био-адхезивен гел за уста. Гелът бързо образува невидим филм, който защитава венците от дискомфорт и болка. Натуралните му съставки помагат за намаление на болката и зачервяването в засегнатите зони.

Апликаторът е снабден със силиконова четка, която нежно масажира венците, като по този начин осигурява облекчение на дискомфорта и симптомите, свързани с никненето на зъбките.



Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки не съдържа локални анестетици, лекарства, алкохол или захар.

Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки не причинява дразнене при приложение и има приятен вкус на банан.

## Указания за употреба:

Нанесете достатъчно гел, за да покриете засегнатата зона и нежно масажирайте венците с апликатора.

За предпочитане е да се прилага след хранене и преди бебето да заспи, за да се улесни образуването на филма и за по-дълго облекчение на болката на малкия пациент. Използвайте толкова често, колкото е необходимо. Затваряйте капачката след всяко приложение. Отстранете всякакви остатъци от продукта, които могат да попречат на следващото приложение на гела.

## Съставки:

Вода, поливинилпирилодон (PVP), малтодекстрин, пропиленгликол, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, *Aloe barbadensis*, ксантанова гума, аромат, калиев сорбат, натриев бензоат, динатриев ЕДТА, натриев хиалуронат, ксилитол, цетилпиридин-хлорид, глициретинова киселина, *Crocus sativus*

## Внимание:

Всяка туба Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки трябва да се използва само от един-единствен пациент, за да се избегне кръстосано замърсяване на апликатора

и гела. Употребата на Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки е противопоказана при данни за свръхчувствителност към някоя от съставките. Ако сте бременна, попитайте Вашия лекар преди употребата на продукта.

## Предпазни мерки и предупреждения:

### ВНИМАНИЕ:

Продуктът трябва да се прилага само от възрастен.

Това медицинско изделие не е играчка! НИКОГА не го оставяйте в ръцете на дете.

Риск от задавяне!

Проверете медицинското изделие преди употреба за всеки признак на увреждане или скъсване и по време на приложение на гела обърнете внимание дали някоя част от горния край на апликатора не се е отделила. Ако това се случи, спрете да го използвате.


Не се опитвайте да възстановите отделената част.

Спрете употребата на изделието, след като гелът е свършил.

Да не се използва след срока на годност или ако тубата изглежда увредена или течаша. Да се съхранява на стайна температура, далеч от директна топлина.

Да не се замразява.

## Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

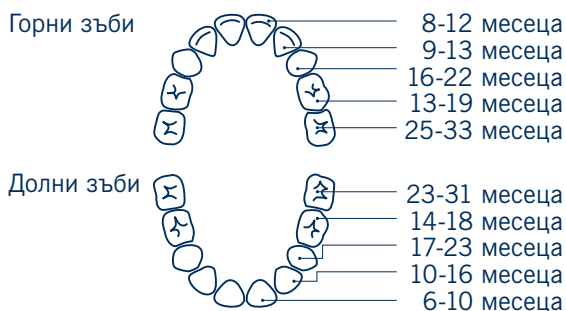

## Съдържание:

10 ml

## Производител:

Alliance Pharma Srl, Viale Restelli 5, 20124 Milan, Италия



## Разпространява се от:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Германия

Последно одобрение: 09/2016 г.